


ТРЕБОВАНИЯ для установки рентгенодиагностического аппарата РАХi.

1. Площадь помещения рентгеновского кабинета, не менее, м².
 - Процедура.....8
 - Комната управления.....6 (может отсутствовать, при использовании средств защиты рабочих мест персонала (ширма, кабина и др.))
2. Габариты помещения
Минимальное расстояние от оборудования слева и справа, для удобства сервисного обслуживания: 300 мм.
3. Требования к перекрытию.
Общий вес рентгенодиагностического аппарата: 145 кг.
4. Требования к электропитанию.
Номинальное сетевое напряжение 220 В.
Потребляемый ток: 6,8 А.
Стабилизатор напряжения (2600ВА)
5. Требования по вентиляции, освещению, радиологической безопасности.
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.802-03
6. Габариты оборудования
Максимальная высота: 2300 мм.
Ширина: 1060 мм.
Глубина: 1200 мм.


Размеры

РАХ-i_ только панорама


Общий вид

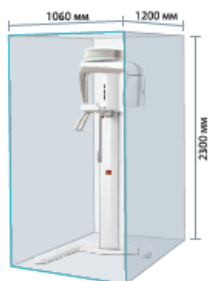

Вид спереди

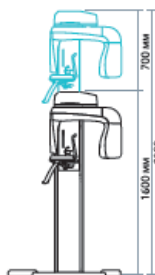

Вид сверху

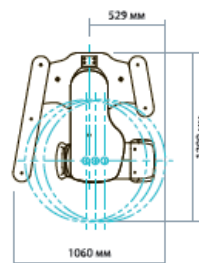

7. Условия монтажа

В процессе монтажа ортопантомографа происходит жесткая фиксация аппарата к полу и стене в рентгенкабинете(если не используется опция - плита-основание), отсюда возникают требования к материалу перекрытия и стены, а так же к отделке, если таковая присутствует.

Допустимый материал стены и перекрытия: бетон или кирпич.

Максимальная толщина отделки стены - не более 10 мм.

Не допускается наличие полостей между отделкой и стеной, к которой будет фиксироваться аппарат.

Если при монтаже оборудования обнаруживается несоблюдение данных требований, дальнейший монтаж не может быть произведен и будет приостановлен до устранения препятствия.

Ознакомлен:

ФИО/_____

Должность/_____

Ознакомлен/_____

М.П.