

www.stomamart.ru



S280GB231500

01/2023

В соответствии с нашей политикой постоянного технологического обновления мы сохраняем за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

В соответствии с действующими стандартами, наличие и спецификации некоторых изделий и/или их характеристики могут различаться в регионах за пределами ЕС. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим местным Дистрибьютором.



S280TRC

НЕОБЫЧАЙНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



«БиЮ Медикал Экуипмент» (BU Medical Equipment)
Юридический адрес и адрес головного офиса
«ЧЕФЛА с.к.» (CEFLA s.c.)
Виа Селиче Провинциале, 23/а,
40026 Имола (Болонья) – Италия
(Via Selice Provinciale, 23/a 40026 Imola (BO) – Italy)
Тел. +39 0542 653111
Факс +39 0542 653344
sternweber@sternweber.com
sternweber.com


Адрес предприятия
Виа Бикокка, 14/С,
40026 Имола (Болонья) – Италия
(Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) – Italy)
Тел. +39 0542 653441
Факс +39 0542 653601



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

STERNWEBER.COM

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

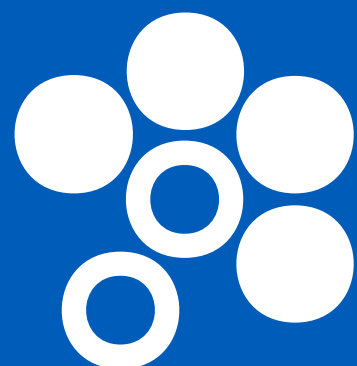

STERN WEBER

УЛЬТРА-ХАЙТЕК

Новые технологии, реализованные в установке S280TRC, обеспечивают стоматологам непосредственное управление встроенными системами. Новый интерфейс мультисенсорной панели управления, голосовое управление и блок интерактивных светодиодов дают стоматологам полный контроль над стоматологической установкой и всеми ее ультрасовременными функциями.

РАЗРАБОТАНО С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕЙ КЛИНИКИ

Для стоматологов, предпочитающих индивидуальную комплектацию, S280TRC предлагает инновационные функции, встроенные гигиенические системы, передовые инструменты для каждой специализации и эксклюзивные эргономические решения, обеспечивающие непревзойдённое удобство эксплуатации.

ВСТРОЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ


Встроенное рентгенодиагностическое оборудование последнего поколения и системы мультимедиа связи на основе изображений превращают установку S280TRC в полноценную рабочую станцию, отвечающую самым высоким требованиям стоматологии.



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

ВАШ ТАЛАНТ НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

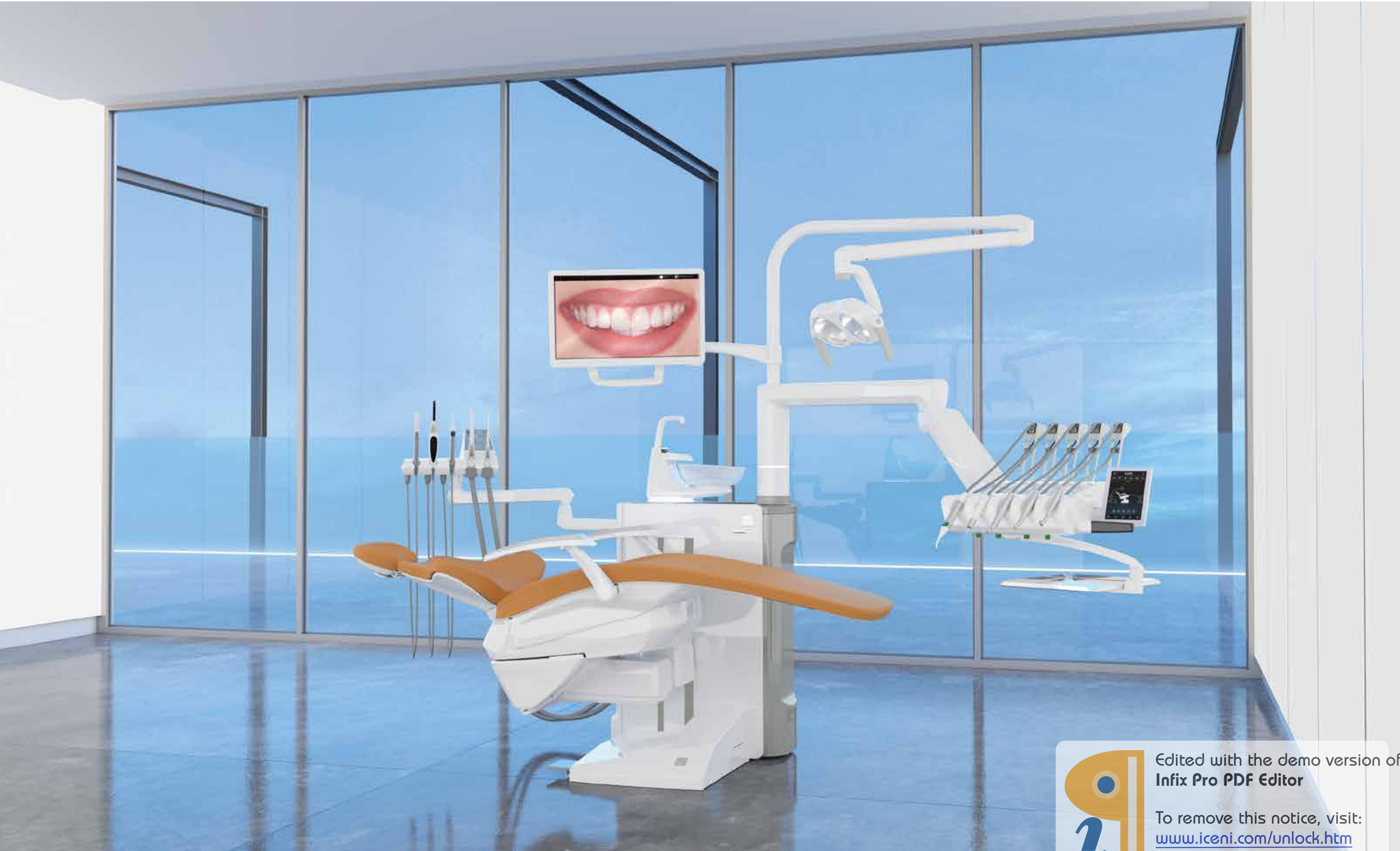

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



**Кресло пациента
разработано для комфорта
пациента и удобства
стоматологической
бригады**

Уникальный доступ к рабочей зоне, поскольку компактное кресло пациента не занимает места на полу. Максимальный комфорт и первоклассное обслуживание пациента. Кресло покрыто износостойким обивочным материалом, имеет безопасную и надёжную систему моторов. Способно выдерживать вес до 190 кг.

Дополнительный датчик, расположенный между спинкой и сиденьем кресла, определяет, находится ли пациент в кресле, с целью сбора статистических данных, выполняемого цифровым виртуальным помощником Di.V.A. При

наличии датчика, указывающего на присутствие пациента в кресле, цвет светодиодного кольца сообщает, что пациент сел в кресло / встал с кресла. Кроме того, датчик способствует долгосрочной эффективности работы, автоматически переводя установку в режим ожидания через заданное время после ухода пациента и активируя механизм автоматического включения/выключения операционного светильника.



Пенный наполнитель с эффектом памяти
Непревзойдённый комфорт и правильная анатомическая поддержка благодаря специальным вариантам обивки.



Стандартная спинка кресла
Форма спинки кресла обеспечивает стоматологическому персоналу удобный доступ к пациенту во время лечения. Спинка удобна для взрослых и детей в процессе любого типа лечения.



Спинка Nordic
Обеспечивает длительный комфорт во время продолжительных сеансов лечения. Предназначена для стоматологов, работающих в режиме «непрямого видения».



Подголовник Atlasis
Позволяет пациенту комфортно находиться в кресле. Простым нажатием кнопки можно регулировать пневматический фиксирующий механизм и найти идеальную позицию для головы пациента, следуя естественным изгибам шеи. Также предусмотрена регулировка подголовника.



Эксклюзивные перемещения для уникальной эффективности

Инновационная функция горизонтального скольжения кресла пациента, доступная в качестве опции, предоставляет дополнительное рабочее пространство стоматологам, работающим в положении «12 часов». Горизонтальное скольжение, синхронизированное с движениями спинки кресла, сводит к минимуму любое сдавливание или растяжение спины пациента, позволяя ему максимально расслабиться при посещении стоматолога. Такое синхронизированное движение позволяет регулировать наклон спинки,

одновременно удерживая полость рта под светом операционного светильника. Оно также облегчает использование микроскопа. Дополнительный комфорт обеспечивается за счёт плавного, бесшумного движения кресла без вибраций (технология Soft Motion). Альтернативой данной технологии является режим медленного перемещения Slow Mode, позволяющий максимально точно регулировать движение кресла. Едва заметные перемещения облегчают работу в ходе процедур имплантологии или при использовании микроскопа.



Многofункциональная педаль ножного управления

Ультрасовременное устройство с эргономичной системой управления в виде боковых салазок, что позволяет стоматологам активировать функции Chip Air и Chip Water непосредственно в процессе эксплуатации установки, изменять направление вращения микромотора (при удалении), управлять движением кресла пациента и возвращаться к сохранённым позициям. Также доступна беспроводная версия.



Педаль ножного управления Pressure-operated

Устройство обладает такой же эффективностью, что и многofункциональная педаль ножного управления, одновременно предлагая различную эргономику для приверженцев пневматических изделий. Оба устройства управляют включением/выключением перистальтического насоса в режиме хирургического вмешательства. Также доступна беспроводная версия.



Педаль ножного управления Power-operated. Устройство обладает такой же эффективностью, что и многofункциональная педаль ножного управления, одновременно предлагая различную эргономику для приверженцев пневматических изделий. Оба устройства управляют включением/выключением перистальтического насоса в режиме хирургического вмешательства. Также доступна беспроводная версия.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Голосовое управление


Для более гибкого взаимодействия персонала с инструментами разработана система виртуального голосового помощника, предлагающая многочисленные возможности улучшения рабочего процесса. Например, ассистент или стоматолог могут регулировать работу операционного светильника с помощью голосового управления. Эта функция позволяет включать и выключать лампу, а также активировать композитный режим. Отсутствие физического контакта со светильником ускоряет выполнение задач и повышает уровень гигиены. Если стоматологическая установка подключена к ПК, стоматологи работают с программой управления изображениями с помощью голосового управления. Это позволяет сохранять изображения, только что снятые камерой или полученные с помощью рентгеновского датчика.

Для подключения функции голосового управления необходимо активировать систему с помощью педали ножного управления на основании стоматологической установки.



Блок интерактивных светодиодов

Опциональная принадлежность установки делает её дизайн более стильным и предоставляет пользователю интуитивно понятную информацию о состоянии различных встроенных функций с помощью светодиодов. Существует несколько предупреждающих световых сигналов / индикаторов. Их цвета предоставляют стоматологам множество полезной информации, от режима работы скалера до хода гигиенического цикла стоматологической установки. Во время обработки корневых каналов с включенным апекслокатором светодиодное кольцо меняет цвет от зелёного к жёлтому и красному в зависимости от расстояния до апекса (дублируя цвет полосы на дисплее). После запуска контрольного таймера светодиодное кольцо постепенно гаснет, начиная коротко мигать по истечении установленного времени.

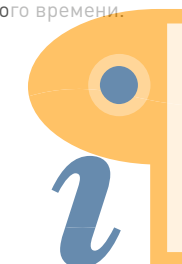

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Улучшенный интерфейс и цифровой виртуальный помощник; новейшая система для усиления клинических преимуществ

Мультисенсорный экран

Интерфейс панели чётко и подробно отображает информацию и предлагает множество вариантов индивидуальных настроек. Обновлённая графика улучшает качество взаимодействия с пользователем и упрощает коммуникацию благодаря простым элементам управления, аналогично смартфону. Противоударная и влагостойкая панель разработана специально для клинических условий и может быть расположена в соответствии с вашими потребностями. Панель управления позволяет легко обновлять функции стоматологической установки по мере необходимости. Панель управления также используют для индивидуальной настройки цвета светодиодного кольца и соответствующих зон активации.

Большой 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением HD обеспечивает отличную видимость в любом ракурсе. Опциональная версия Multimedia отображает снимки и видео. Панель управления в комплекте версии Clinic отображает данные о ходе терапевтического, эндодонтического и имплантационного лечения, помогает пользователю управлять движением кресла пациента и встроенными гигиеническими устройствами. Противоударная и влагостойкая панель разработана для работы в клинических условиях. Устойчива к загрязнениям из полости рта.



easycheck


Носимые технологии и голосовое управление

Чтобы идти в ногу с техническим прогрессом, целый ряд изделий Stern Weber поддерживает подключение к Интернету. Это новшество обеспечивает доступ к дополнительным цифровым услугам, повышая эффективность хирургической стоматологии.

Di.V.A. (Цифровой виртуальный помощник)

Di.V.A. позволяет стоматологам и хирургам контролировать работу стоматологической установки, инструментов и выполняемые циклы дезинфекции с помощью удобной панели управления. Данные получают легко и быстро, поскольку управление ими осуществляется на веб-портале, доступном из любого браузера.

При наличии датчика, определяющего присутствие пациента в кресле, пользователи могут точно оценить эффективность использования кресла пациента. Кроме того, Di.V.A. предоставляет прямой доступ к обучающим видеороликам и к руководству пользователя рассматриваемой модели.

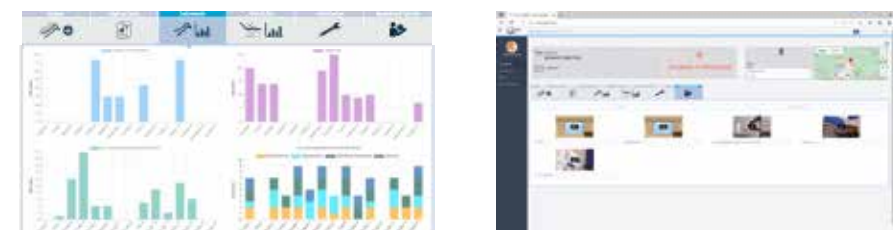

При подключении к сети с помощью приложения Easy Check можно рассчитывать на получение удалённой помощи в диагностике и технической поддержки стоматологической установки в режиме реального времени. Этот полезный инструмент помогает техническим специалистам максимально быстро и эффективно оказывать необходимую помощь.

Мгновенно подключайте NFC-устройства для доступа к пользовательским настройкам. Просто поднесите силиконовый браслет (который можно дезинфицировать) к модулю врача, чтобы активировать ранее сохранённые рабочие настройки (т.е. параметры инструментов, кресла пациента, операционного светильника, а также настройки интерфейса). Голосовое управление также является дополнительной функцией: она распознаёт голосовые команды для микромотора, скалера, операционного светильника, положения кресла пациента, таймеров и переключения профилей пользователей. Она также облегчает выполнение задач, когда ассистента нет рядом.



USB-подключение

При наличии встроенной мультимедийной системы стоматологи могут использовать USB-порт (доступный в Full Touch Multimedia) для загрузки/скачивания диагностических изображений.



Управление несколькими профилями

Стоматологи, работающие с установкой S280TRC, могут настраивать все рабочие параметры в соответствии с клиническими требованиями и сохранять их непосредственно на панели управления или на флешке. В качестве альтернативы пользователи могут выбрать подключение к NFC-устройству.



Подключение к NFC-устройству

Пациенты могут использовать NFC-устройство (например, браслет класса IP68. Каждый из 20 слотов может хранить до 10 рабочих настроек. Эффективное инновационное решение для клиник с несколькими пользователями.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Новые инструменты для идеального выполнения стандартных процедур

Помимо широкого выбора турбинных наконечников, угловых наконечников и ультразвуковых скалеров, новые бесщёточные микромоторы оснащены инновационной технологией FIT (метод идентификации с помощью флуоресценции). Речь идёт о выявлении

композитных материалов благодаря флуоресценции, излучаемой специальным светодиодом, встроенным в инструмент. Кроме того, широкий спектр излучения позволяет новой полимеризационной лампе работать с композитными материалами последнего поколения.



Скалеры SC

Ультразвуковые скалеры для выполнения задач профилактики наддесневых участков и работы с пародонтом. Также подходят для подготовки небольших полостей и могут применяться для эндодонтической чистки корневых каналов. Светодиодное кольцо указывает текущий режим работы скалера: PARO (пародонт) – зелёный; ENDO (эндодонтия) – оранжевый; NORMAL (стандартный) – голубой.



Микромоторы FLUO (i-XS4 and i-XR3L)

Облегчённые и почти бесшумные микромоторы теперь доступны с технологией FIT для обнаружения композитных материалов. Они позволяют быстрее и точнее удалить старый композит из зубов, подлежащих повторному лечению. В процессе ортодонтического или эстетического лечения позволяет легко, безопасно и эффективно снять брекеты.



Турбинные и угловые наконечники

Шесть бесшумных, но мощных моделей высокотехнологичных турбинных наконечников, а также широкий спектр эргономичных угловых наконечников, отвечающих различным клиническим потребностям, от терапевтической стоматологии до имплантационной хирургии и эндодонтии. После отключения инструмента (турбинного наконечника, микромотора) светодиодное кольцо указывает на активацию режима распылителя.



Полимеризационная лампа T-LED

Спектр излучения новой полимеризационной лампы обеспечивает оптимальную активацию композитов даже последнего поколения. Усовершенствованная эргономичная конструкция с характерной поворотной ручкой и новым удобным интерфейсом.



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Инструменты, функции и встроенные устройства для имплантологии и эндодонтии

Стоматологическая установка включает все элементы, необходимые для проведения специального лечения. Микромотор i-XS4 позволяет стоматологам в любой момент переключиться из терапевтического режима в режим ENDO или IMPLANT. Установка отличается удобством элементов управления, индивидуальными настройками для одного или нескольких стоматологов, возможностью отображения данных на панели управления. Панель Full Touch в версиях Clinic и Multimedia представляет собой специализированный интерфейс, демонстрирующий ход специального лечения. Оба режима обеспечивают эффективную помощь во время лечения, экономят время и ускоряют рабочий процесс. Торговые марки эндодонтических файлов не являясь собственностью компании «Чефла» (Cefla) или её дочерних компаний.



Эндодонтия

Имея доступ к предварительно загруженному архиву, стоматолог может проводить лечение как традиционными, так и реципрокными инструментами (дополнительный режим). Благодаря специальному угловому наконечнику апекслокатор позволяет отображать на дисплее расстояние до апекса.



Апекслокатор

Апексодитор
При обработке корневого канала на дисплее отражается расстояние от апекса. При этом светодиодное кольцо меняет цвет с зелёного на жёлтый и красный в зависимости от расстояния до апекса, дублируя цвет полосы на дисплее. Когда апекс совсем близко, раздаётся сигнал зуммера. Когда апекс достигнут, вращение микромотора прекращается.



Имплантология

Для целей имплантологии в установку могут быть встроены некоторые системы, включая перистальтический насос. Им можно управлять с помощью панели управления или педали ножного управления стоматологической установки, что избавляет от необходимости использования крупногабаритных автономных устройств. Стоматологи могут легко установить и сохранить клинические параметры для каждого этапа подготовки ложа имплантата и установки имплантата.



Графики крутящего момента

Рис. 1. Функция записи графика крутящего момента

В программе «Pro PDF Editor» график крутящего момента микромотора, весь график в целом представляет собой полезный клинический инструмент для последующего лечения соседних зубов или удаления имплантата. Кликните по картинке, чтобы загрузить этот документ

remove this notice visit: www.pdf-editor.com/unlock.htm

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm




**Операционный светильник
нового поколения для
любых клинических
потребностей**

Новая светодиодная лампа Venus LED MCT – огромный шаг вперёд в разработке систем клинического освещения. Её индекс цветопередачи (CRI) превышает 95, обеспечивая сверхвысокое цветоразрешение, а наличие 3-х цветовых температур позволяет пользователям выбрать надлежащее освещение для конкретных клинических потребностей. Интенсивность света регулируется до 50 000 люкс. Широкая лампа направленного света и исключительная глубина резкости (55 – 85 см) позволяют стоматологу практически не перемещать лампу во время лечения. Более того, можно быстро активировать композитный режим для предотвращения преждевременного отверждения композитных материалов. При наличии опционального виртуального голосового помощника стоматолог может включить операционный светильник посредством голосового управления. Эта функция позволяет включать и выключать лампу, а также выбирать композитный режим. Отсутствие физического контакта со светильником ускоряет выполнение задач и повышает уровень гигиены.



Направленный свет, высокая функциональность
Светодиодная лампа Venus LED MCT имеет специальные настройки для любой потребности. Имеются три настройки, оптимальные для различных условий: тёплый свет (4300 K) для хирургического лечения, нейтральный свет (5000 K) для терапевтических процедур и холодный свет (5500 K) для восприятия реального цвета.

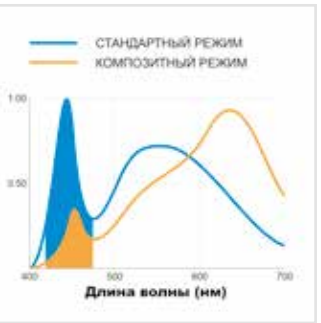


Композитный режим
Работа в композитном режиме обеспечивает максимальную мощность света в рабочей зоне, не влияя на полимеризацию композитного материала. Фильтрация волн в диапазоне 400-450 нм снижает активность камфорхиона и даёт больше времени для моделирования материалов.




Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

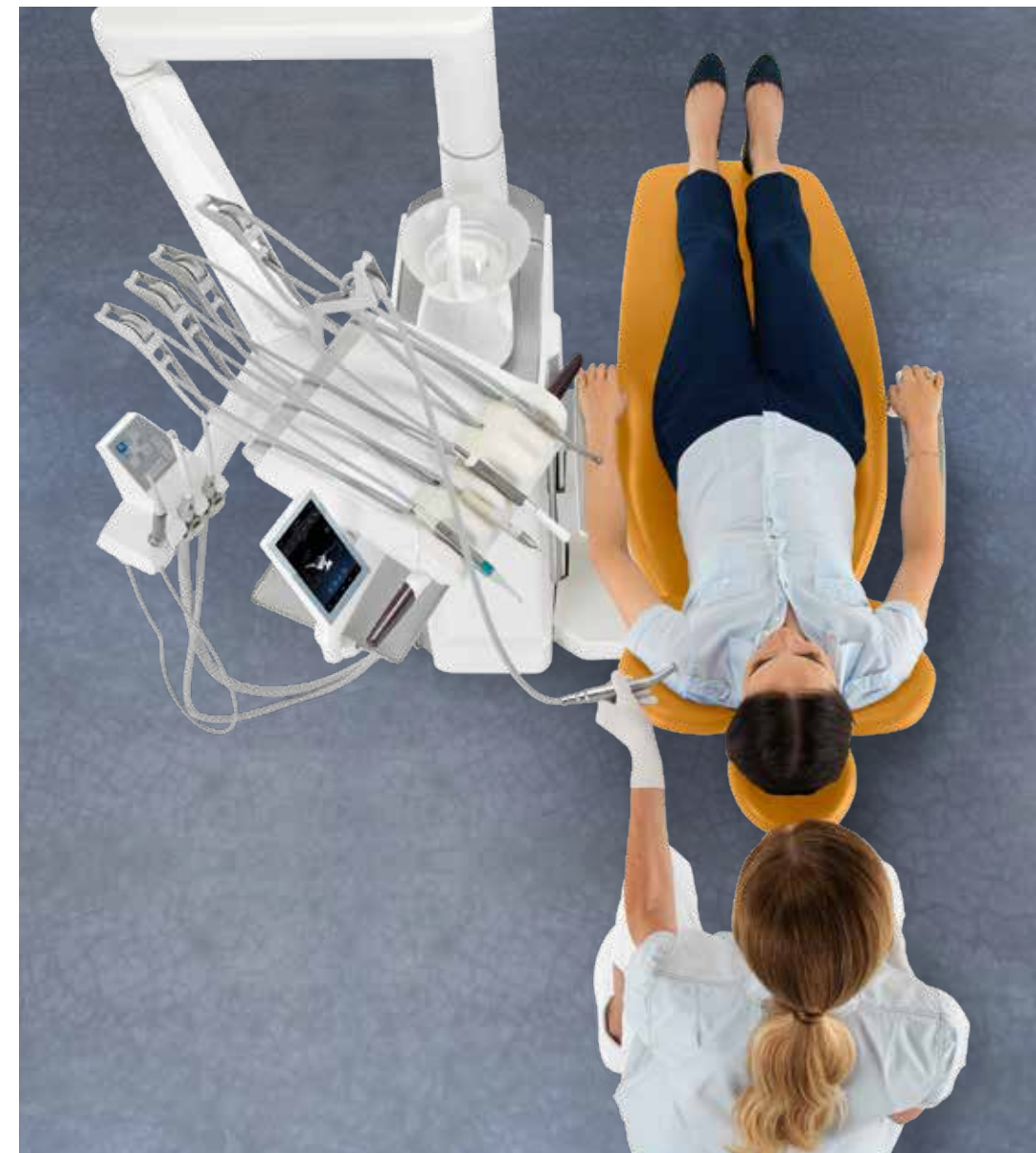

**Исключительная
манёвренность для
выполнения всех видов
работ**

Новый модуль Continental малогабаритный, обладает компактной конфигурацией, оснащён новыми шарнирными плечами. Врач без усилий занимает любую рабочую позицию. Рабочую высоту легко установить благодаря пневматическому фиксатору, который разблокирует систему шарниров при активации сенсора на рукоятке. Высота рычага инструмента уменьшена, чтобы не создавать помех при освещении рабочей зоны. Лёгкий модуль врача обтекаемой формы никогда не загромождает свет операционного светильника во время процедуры. Достаточная амплитуда поворота системы шарнирных плеч позволяет переместить модуль в трансоракальную позицию.

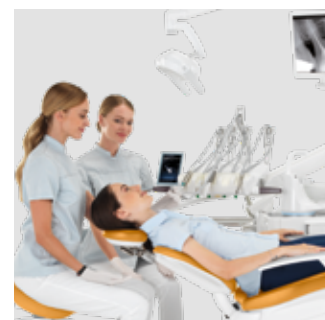

Левосторонний блок
Опциональный блок установки S280TRC Continental. Конструкция левостороннего блока позволяет разместить консоль с левой стороны модуля для инструментов. Для лучшей манёвренности блок снабжён дополнительной рукояткой.



Модуль ассистента
Модуль с сенсорным экраном обладает достаточной амплитудой перемещения по вертикали. Двойное шарнирное плечо позволяет идеально позиционировать модуль для любой клинической ситуации. Доступен с держателями на 3 или 5 инструментов.



Компактный лоток Лоток из нержавеющей стали удобно располагается под модулем. Способен изменять положение в качестве опции пользователям прост в использовании и подходит как для стоматолога, так и для его ассистента. В качестве альтернативы доступен вариант лотка меньшего размера и объема. Система рычагов для инструментов Рычаги с шарнирными соединениями, позволяющими перемещать инструмент вбок. Инструментальные рычаги не вызывают усталости при длительном использовании. Кроме того, система рычагов имеет достаточную амплитуду перемещения.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



**Модуль, удовлетворяющий
эргономическим
потребностям тех, кто
работает с подвесными
инструментами на трубах**

Особая конструкция и мобильность шарнирного устройства позволяет стоматологам установить модуль в любое рабочее положение в соответствии со своими клиническими потребностями. Эргономичное расположение держателей позволяет удобно брать инструменты. С помощью большого монитора можно управлять движением кресла пациента, инструментами и встроенными системами.




Держатель лотка
Модуль модели International снабжён большим держателем трансторакального лотка. Для большего удобства держатель лотка можно расположить по своему желанию.



Шестой инструмент
Модуль стоматолога модели International может быть укомплектован дополнительным инструментом: видеокamerой или полимеризационной лампой T-LED.



Негатоскоп
Модуль стоматолога модели International может быть укомплектован подсветкой, которая может использоваться для рентгеновских снимков, в том числе панорамных.

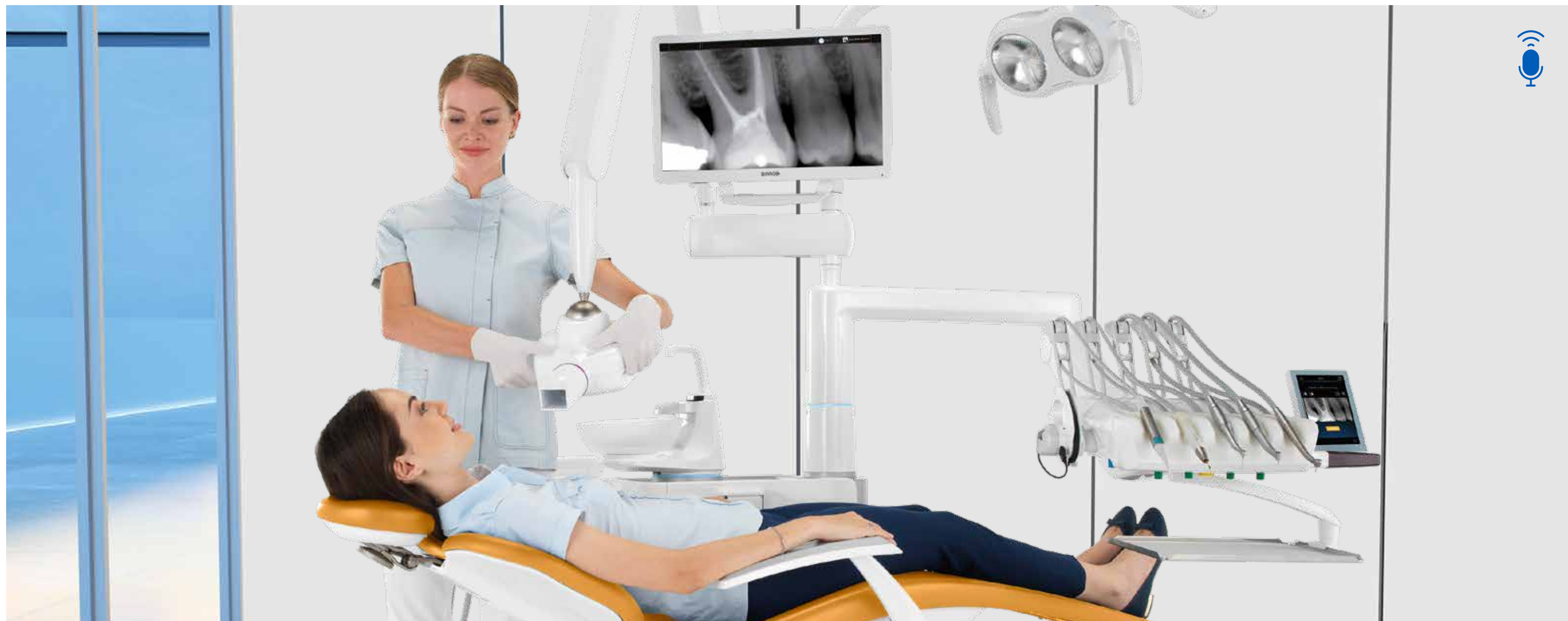

**Всё необходимое
оснащение для
выполнения
рентгенодиагностики**

Высокотехнологичная система включает рентгеновский аппарат с цифровым беспроводным портативным блоком управления, светодиодный монитор с дополнительной функцией сенсорного экрана и цифровой датчик последнего поколения. Рентгеновские изображения за считанные секунды отображаются на 22-дюймовом мониторе, а также на 7-дюймовом экране панели управления Full Touch (версия Multimedia). Все эти средства расширяют диагностические возможности и сокращают время процедуры.



Высокочастотный рентгеновский аппарат RXDC – Технология HyperSphere
Рентгеновский аппарат, встроенный в стоматологическую установку, и портативный блок управления не требуют дополнительных точек установки. Благодаря сочетанию коллимации 30 см и фокального пятна 0,4 мм достигается исключительно высокая параллельность лучей, а снимки отличаются необыкновенной чёткостью. Тубус рентгеновской трубки открывается и закрывается сенсорными щитками, свободно вращается вокруг сферического шарнира.

Рентгеновский датчик Zen-X
Извлекаемый датчик Zen-X – это портативный и беспроводной датчик, способный захватывать изображения в высоком разрешении при минимальной дозе облучения. Он доступен в двух разных размерах и сертифицирован по стандарту IP67 (защита от проникновения воды и пыли).

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm






Информирование повышает доверие пациента

Стоматологическая видеокамера HD последнего поколения и медицинский монитор Full HD 16:9 с регулируемым наклоном доступны стоматологам в виде встроенной мультимедийной системы. Это важнейший инструмент повышения мотивации пациента. Узкая конструкция наконечника позволяет стоматологической видеокамере с лёгкостью достигать дистальных зон. Превосходная глубина резкости исключает необходимость ручной фокусировки.



Full Touch Multimedia
Панель управления Full Touch Multimedia позволяет пользователям видеть рентгеновские снимки, фото- и видеоизображения. Функции сенсорного экрана позволяют стоматологам прокручивать файлы и увеличивать изображения на 7-дюймовом дисплее.

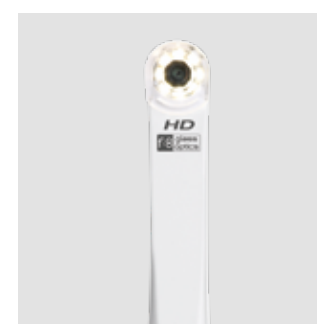

HD-камера C-U2
Передаёт изображения высокого качества непосредственно на панель управления Full Touch Multimedia на встроенный монитор. Ускоряет процесс диагностики, получает материал для документирования лечения и составления истории записей.



22-дюймовый LED-монитор
Монитор Full HD с регулируемым наклоном, позволяющий стоматологам видеть изображения в любом желаемом положении.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Гигиенические системы
имеют сертификаты
научных центров для
полной уверенности
стоматологов и пациентов

Панель управления Full Touch позволяет легко управлять целым рядом гигиенических устройств. Стоматологи могут укомплектовать стоматологическую установку в соответствии с конкретными потребностями. Удобный интерфейс помогает пользователям управлять обслуживанием и ежедневной дезинфекцией водяных контуров, одновременно защищая установку от болезнетворных микробов.

Конструкция стоматологической установки предусматривает нахождение инструментов во встроенных держателях. Это снижает время, необходимое для запуска выбранного цикла (BIOSTER и/или I.W.F.C.), и уменьшает потребность в использовании других принадлежностей. Кроме того, емкость для дезинфицирующего средства можно легко заполнить сверху, не открывая крышку без доступа к внутренней части стоматологической установки.

Индикация разных этапов гигиенического цикла (начало, контактная пауза и конец цикла) мгновенно осуществляется с помощью изменения цвета светодиодов.



Эффективность комбинированных систем

Испытания, проведенные Римским университетом «Ла Сапиенца» и кафедрой здравоохранения и педиатрии Туринского университета, показали, что сочетание ежедневного интенсивного цикла дезинфекции BIOSTER и использования системы W.H.E. приводит к полному отсутствию бактериальной нагрузки в охлаждающих жидкостях, проходящих через инструменты.



Устройство I.W.F.C.
Устройство активируется с помощью панели управления. Обеспечивает автоматическую промывку трубок, если аппарат некоторое время не эксплуатировался. Включено в состав системы BIOSTER или приобретается отдельно.



Система A.C.V.S.
Автоматическая система отсоса, выполняющая циклы санитарной обработки между двумя пациентами. Практичная и быстрая.



Система W.H.E.
Непрерывная система дезинфекции на основе дезинфектанта Peroxu Ag+ (H₂O₂) и устройства, создающего воздушного зазора между контурами водопроводной сети и стоматологической установки. Борется со всеми примесями и загрязнениями, включая бактерии Legionella.



Устройство SANASPRAY
Устройство для дезинфекции вместо водопроводной воды.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Гибкая схема размещения оборудования в стоматологической клинике

Благодаря концепции разных вариантов подключений можно сохранить предыдущую схему размещения оборудования в стоматологической клинике даже при замене существующей стоматологической установки.

При монтаже новой установки подойдут уже имеющиеся напольные розетки, поэтому для подключения модели Stern Weber дополнительные монтажные работы не требуются. Стильные и эффективные крышки блока входов подключения не нарушают внешний вид медицинского кабинета.


Доступные конфигурации

Для оптимальной схемы размещения оборудования в кабинете и успешного монтажа можно выбрать одну из предлагаемых конфигураций (см. рис.).

P – входы подключения расположены под задней частью гидроблока

K – входы подключения расположены под передней частью гидроблока

S / S short – входы подключения расположены под подставкой для ног кресла пациента


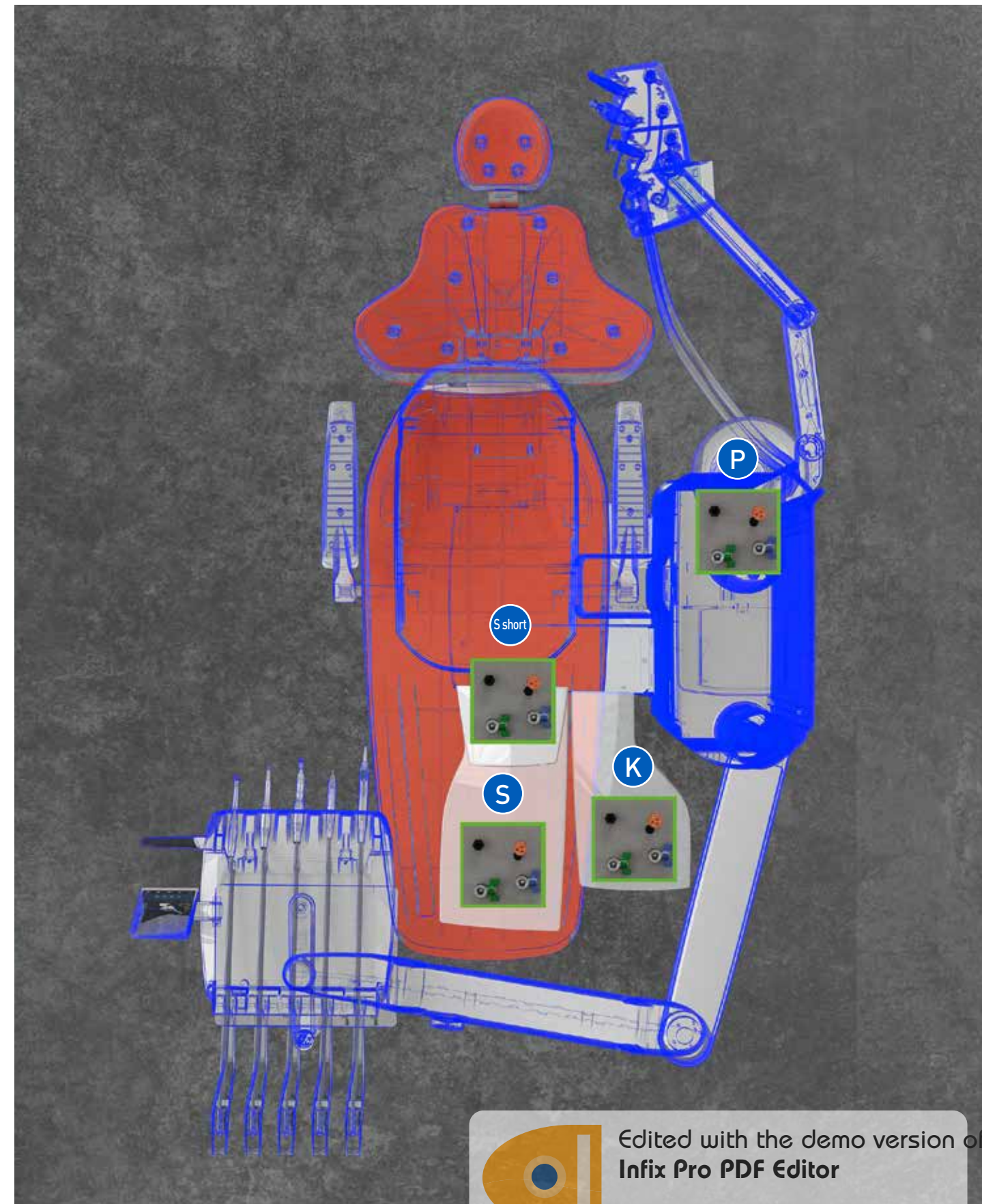


Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor


To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

S280TRC	CONTINENTAL	INTERNATIONAL
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ		
BIOSTER	*	*
Система A.C.V.S.	*	*
Устройство SANASPRAY	*	*
Система W.H.E.	*	*
Устройство I.W.F.C.	*	*
МОДУЛЬ ВРАЧА		
ЛЕВОСТОРОННИЙ БЛОК	*	—
Голосовое управление	*	*
7-дюймовый экран Clinic Full Touch	●	●
7-дюймовый дисплей Multimedia Full Touch	*	*
Микромотор i-XR3 с фиброоптикой (100 – 40 000 об/мин, 3,3 Нсм)	●	●
Микромотор i-XS4 с фиброоптикой (100 – 40 000 об/мин, 5,3 Нсм)	*	*
Микромотор i-XR3 L FLUO	*	*
Микромотор i-XS4 FLUO	*	*
Скалер (с фиброоптикой или без неё)	*	*
6-функциональный шприц-пистолет	●	●
Шестой инструмент	*	*
Встроенный рентгеновский датчик	*	*
Модуль для возвратно-поступательного режима Reciprocating Mode	*	*
Встроенный апекслокатор	*	*
Набор с перистальтическим насосом	*	*
Графики крутящего момента – функция для имплантологии	*	*
Система беспроводной передачи данных на близкое расстояние (NFC)	*	*
ГИДРОБЛОК		
Блок интерактивных светодиодов	*	*
Стеклоянная чаша-плевательница	●	●
Керамическая чаша-плевательница	*	*
Система привода чаши-плевательницы	*	*
Датчик наполнения стакана	*	*
Нагреватель воды для стакана	●	●
Нагреватель воды для распылителя	*	*
Независимый выбор канюль	●	●
Держатель лотка на модуле ассистента	*	*
Модуль ассистента с держателями на 3 инструмента	●	●
Модуль ассистента с держателями на 5 инструментов	*	*
Лампа Venus LED MCT	●	●
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА		
ПЛАВНЫЕ движения и функция скольжения	*	*
Подголовник Atlaxis	*	*
Регулируемый правый подлокотник	*	*
Левый подлокотник	●	●
Датчик присутствия пациента в кресле	*	*
Многофункциональная педаль ножного управления	●	●
Педаль ножного управления Pressure-operated	*	*
Педаль ножного управления Power	*	*
Беспроводная многофункциональная педаль ножного управления	*	*
Беспроводная педаль ножного управления Pressure-operated	*	*
Педаль ножного управления Power – беспроводная	*	*


● стандартная комплектация * опция — нет в комплектации

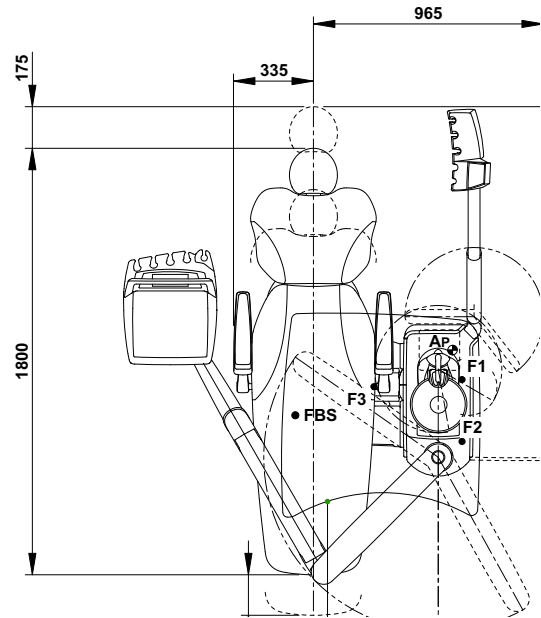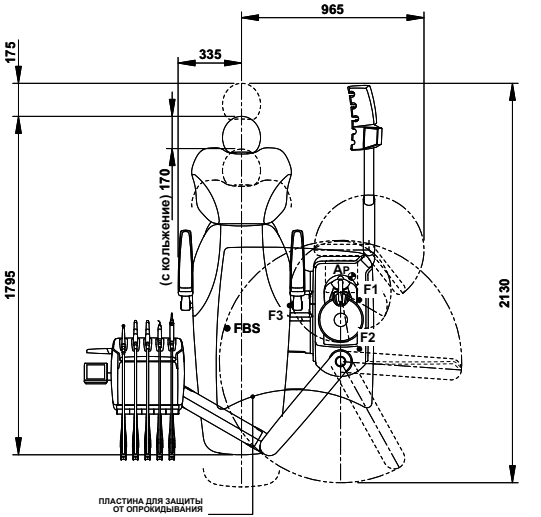

CONTINENTAL

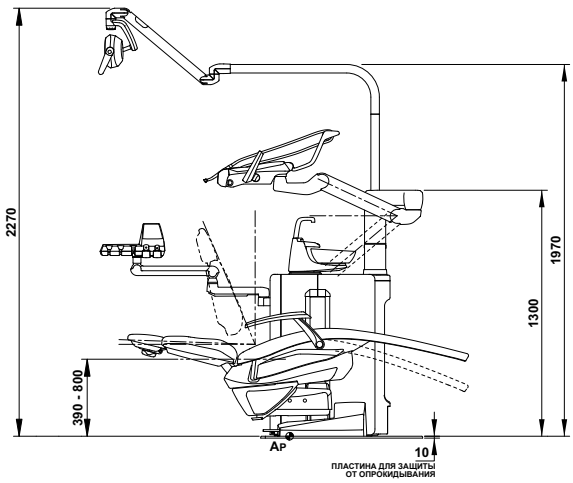

INTERNATIONAL

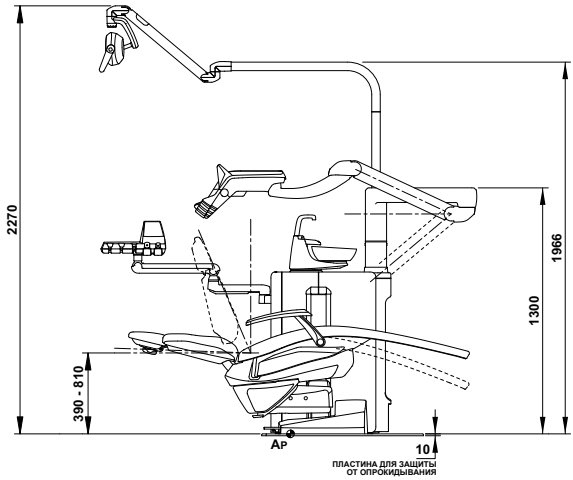

Размеры на чертежах указаны в мм.

198
Пенный наполнитель с эффектом памяти

196
Пенный наполнитель с эффектом памяти

183
Пенный наполнитель с эффектом памяти

186
Пенный наполнитель с эффектом памяти

192
Пенный наполнитель с эффектом памяти

184
Пенный наполнитель с эффектом памяти

194
Пенный наполнитель с эффектом памяти

195
Пенный наполнитель с эффектом памяти

182
Пенный наполнитель с эффектом памяти

193
Пенный наполнитель с эффектом памяти

197
Пенный наполнитель с эффектом памяти

187
Пенный наполнитель с эффектом памяти

199
Пенный наполнитель с эффектом памяти

180
Пенный наполнитель с эффектом памяти

102
Атлантический синий

106
Средиземноморско-Тихоокеанский синий

113
Тихоокеанский синий

136
Индийский синий

132
Чернично-фиолетовый

134
Японская глициния

135
Венецианский красный

115
Шотландский лосось

103
Желтая Невада

123
Пиринейско-синий

101
Карибский

137
Атласный

121
Антрацитовый

130
Графитовый

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm